

ACTES	TUBE RECOMMANDE	TUBE TOLERE	QUANTITE (sang total)	Condition / Délai d'acheminement	Réalisation	Délai de rajout d'analyse
ACE	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Adénovirus	Selles			Acheminement rapide	J1	12H
Ac lactique (= lactates)	Plasma Fluoré		2ml	Transport dans la glace dans les plus brefs délais <15minutes /instable	J0	NA
Acide urique	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
	Urines					
Acide valproïque (dépakine)	Sérum	Plasma hépariné	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
AFP (alpha foeto protein)	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
ALAT	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Albumine	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Amylase	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Anticorps anti-thyroglobuline	Sérum	Plasma hépariné	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Anticorps anti-thyroperoxydase	Sérum	Plasma hépariné	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Ac anti R TSH	Sérum	Plasma hépariné	4ml	24h T° ambiante	J0	24H
AMH	Sérum		2ml	7H	J0	24H
Anti-nucléaires/ENA/DNA...	Sérum		4mlx2	7 heures T°C ambiante	J14	48H
ASDO et ASLO	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J14	48H
Bicarbonates (=CO2=réserve alcaline)	Plasma hépariné		4ml	7 heures T°C ambiante	J0	4H
Bilirubine Totale, Libre	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante A l'abri de la lumière pour les N-Nés	J0	24H
BNP: Brain Natriuretic Peptide (NT)	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	24H
CA 125	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
CA 15-3	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
CA 19-9	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	48H

Calcium	Urines			7 heures T°C ambiante	J0	48H
Cellules de Sézary	Sang total EDTA		4ml	4 heures T°C ambiante	J0	12H
Chlamydiae PCR/Gono	Urines		10ml	4 heures T°C ambiante	J1	24H
Chlore	Plasma hépariné		4ml	7 heures T°C ambiante	J0	48H
	Urines			7 heures T°C ambiante	J0	48H
Cholestérol total HDL/LDL/Apo	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Clostridium difficile	Selles			< 2h T°C ambiante	J1	12H
Compte d'Addis (HLM)	Recueil des urines sur 3 h (cf. protocole du			< 2h T°C ambiante	J0	24H
CMV (CYTOMEGALO VIRUS)	Sérum		4ml	24 heures	J0	48H
Coefficient de saturation à la Transferrine	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Coproculture / parasitologie	Selles			< 2h à T° ambiante	J2	NA
Corps cétoniques	urines			2 heures	J0	NA
Cortisol	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	48H
CPK (créatine kinase)	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	12H
Créatinine/Clairence de la Créatinine	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
	Urines			7 heures T°C ambiante	J0	48H
CRP (Protéine C Réactive)	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Cryoglobulines	Tube sec sans Gel (Sérum)		3 tubes 4 ml	A 37°	J7	NA
Culot urinaire	Urines (flacon stérile)			< 2h T°C ambiante	J0	12H
C3-C4	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Densité Urinaire	Urines			7 heures T°C ambiante	J0	NA
Dengue PCR	Sang total EDTA	Sérum	4ml (Tube dédié ou 1 Tube en plus)	7 heures T°C ambiante	J0	12H
Dengue Ag NS1	Sérum		4 ml	24h T° ambiante	J0	24H
Dengue sérologie	Sérum		4ml	24h T° ambiante	J0	24H
Dépakine (Acide	Sérum	Plasma hépariné	4ml	7 heures	J0	24H

valproïque)	Sérum	Plasma hépariné	4ml	T°C ambiante	J0	48H
D- Dimères	Plasma Citraté		2ml	4 heures T°C ambiante	J0	NA
EBV (EPSTEIN- BARR) Ac EBNA, VCA	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
ECBU	Urines (flacon stérile ou avec borate)			< 2h ou <7h sur borate	J2	12H
Electrophorèse des protéines	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Estradiol	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	48H
Facteur rhumatoïde	Sérum	Plasma hépariné	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Fer sérique	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures	J0	48H
Ferritine	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures	J0	48H
Fibrinogène	Plasma citraté		2ml	4 heures T°C ambiante	J0	NA
Filaire (Ag)	Sang total hépariné		2ml	12 heures T°C ambiante	J0	12H
Folates (= vitamine B 9)	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	8H
FSH	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	24H
Gamma GT	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	24H
Glucose	Plasma fluoré		4ml	12 heures T°C ambiante	J0	12H
	Urines			7 heures T°C ambiante	J0	NA
Groupe sanguin	Sang total EDTA		4ml	7 heures T°C ambiante	J0	24H
Haptoglobine	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	24H
HCG	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Hématozoaires : recherche	Sang total EDTA		4ml	2 h T°C ambiante	J0	NA
Hémoglobine glyquée Hba1c	Sang total EDTA	Plasma hépariné	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	24H
HEPATITE A (HAV) Sérologie IgG	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
HEPATITE A (HAV) Sérologie IgM	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Hépatite B (VHB) Sérologie (AgHbs, Ac Hbs, Ac Hbc, Hbe)	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H

Hépatite C (VHC)	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
HGPO: Hyperglycémie provoquée	Plasma fluoré		4ml pour chaque prélèvement, T0, T60, T120	7 heures T°C ambiante	J0	NA
HT21 (dépistage trisomie 21)	Sérum		2x4 ml	7 heures T°C ambiante	J7	NA
DPNI	Tube STRECK (à récupérer au labo)		STRECK	7H	J15	NA
Immunoglobulines E totales	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Immunoglobuline IgA	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Immunoglobuline IgG	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Immunoglobuline IgM	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	48H
Insuline (HOMA)	Sérum		4ml	7H	J0	24H
L D H	Plasma hépariné	Sérum	4ml	2 heures T°C ambiante	J0	8H
Leptospirose	Sang Total EDTA	Sérum	4 ml (Tube dédié ou un tube en +)	6 heures T°C ambiante	J1	NA
Sérologie Leptospirose	Sérum		4ml	24h T° ambiante	J2	24H
LH	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Lipase	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Magnésium	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures	J0	8H
	Urines			T°C ambiante	J0	8H
Microalbumine	Urines (échantillon ou sur 24h)		4ml	7 heures T°C ambiante	J0	24H
MNI test	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Numération Formule Sanguine NFS/Plaquettes	Sang total EDTA		2ml	7 heures T°C ambiante	J0	12H
Numération réticulocytes	Sang total EDTA		2ml	7 heures T°C ambiante	J0	12H
Osmolarité plasmatique	Plasma hépariné		4ml	7 heures T°C ambiante	J0	12H
Osmolarité urinaire	Urines			7 heures T°C ambiante	J0	12H
Paludisme	Sang total EDTA		2ml	1 heures T°C ambiante	J0	12H
Parathormone (PTH)	Plasma hépariné		4ml	7 heures T°C ambiante	J0	8 H

pH	Urines			7 heures T°C ambiante	J0	12H
Phosphatase alcaline (PAL)	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Phosphore	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures	J0	8H
	Urines			T°C ambiante	J0	8H
Potassium	Plasma hépariné		4ml	4 heures T°C ambiante	J0	12H
	Urines			7 heures T°C ambiante	J0	48H
Préalbumine	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J1	48H
Procalcitonine (PCT)	Plasma hépariné	Sérum	4ml	4 heures T°C ambiante	J0	48H
Progestérone	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J1	48H
Prolactine	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
PSA (totale et libre)	Sérum		4ml	6 heures PSA libre <3h	J0	24H
Protéines	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
	Urines (ech/24h)			7 heures T°C ambiante	J0	48H
RAI (recherche agglutinines irrégulières)	Sang total EDTA		4ml	7 heures T°C ambiante	J0	48H
Recherche de Sang	Urines			4 heures	J0	12H
	Selles			4 heures	J0	12H
Rotavirus	Selles	acheminement rapide		4 heures T°C ambiante	J1	12H
RUBEOLE Sérologie: Ac IgG	serum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Syphilis : sérologie	Sérum		4ml	24 heures	J1	48H
Sodium	Plasma hépariné		4ml	7 heures	J0	24H
	Urines(ech/24h)			7 heures T°C ambiante	J0	24H
T3 libre	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
T4 libre	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	24H
TCA	Plasma Citraté		2ml	4 heures T°C ambiante	J0	NA
TP/INR	Plasma Citraté		2ml	12 heures T°C ambiante	J0	12H

Test au Synacthène® immédiat (Cortisolémie)	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	48H
Testostérone	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Thyroglobuline	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Toxoplasmose: sérologie et avidité	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Transferrine	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	24H
Triglycérides	Plasma hépariné	Sérum	4ml	12 heures T°C ambiante	J0	24H
Troponine	Plasma hépariné	Sérum	4ml	1 heures T°C ambiante	J0	24H
TSH	Plasma hépariné	Sérum	4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Urée	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	48H
	Urines			7 heures T°C ambiante	J0	48H
VIH Sérologie Dépistage VIH1/2 + Ag p24	Sérum		4ml	24 heures T°C ambiante	J0	48H
Vitamine B12	Plasma hépariné	Sérum	4ml	7 heures T°C ambiante	J0	24H
Vitamine D 25(OH)	Plasma hépariné	Sérum	4ml	12 heures T°C ambiante	J0	48H
Vitesse de sédimentation	EDTA		2ml	7 heures T°C ambiante	J0	NA

Pour tous les autres examens, vous pouvez consulter le laboratoire d'analyses spécialisé cerba:
<https://www.lab-cerba.com/sites/Cerba/home/transmettre-et-prescrire-un-exam/catalogue-en-ligne>
 sinon contacter un de nos laboratoires.

[illegible]

Noter volume des 24 heures
Faire analyse sur 3j
1 ^{er} jet avec urines concentrées
Noter volume des 24 heures
A jeun
Cf protocole du laboratoire
Renseignements cliniques
bandelette
Prélèvement le matin au lever (entre 8h et 10h)
Préciser le poids si cockroft
Noter volume des 24 heures
Prélèvement à 37° et à jeun (au labo)
2 ^{ème} jet des urines
bandelette
Date début des symptômes- Fiche VS a completer
Date de début de symptômes
Date de début de symptômes

URGENCE
A jeun Proscrire tube hémolysé
Préciser jour du cycle
- Jeune recommandé
Renseigner la date des dernières règles
A jeun
Voir protocole du laboratoire
Renseigner la date des dernières règles
Contrôle immunité
Recherche hépatite aigue

Noter heure de chaque prélèvement sur le tube
Fiche de renseignements signée obligatoire
Fiche de renseignements signée obligatoire
instable
Fiche de renseignements cliniques VS
Fiche de renseignements cliniques VS
Préciser la diurèse
URGENCE +++

Préciser la diurèse
Proscrire les prélèvements hémolysés
Préciser la diurèse
URGENT
Après 20 min de repos et avant 9h
Préciser la diurèse
Noter la prise de rophylac si femme enceinte
Préciser la diurèse
Préférer un dosage le matin
Préférer un dosage le matin Pas de prise de Levothyrox avant dosage
Préciser médicament et posologie si INR

Prélèvement à distance du traitement (48h) A jeun depuis 12h + repos depuis 30 min, Bien noter l'heure sur les tubes
Préciser si grossesse
A jeun
URGENCE+++
Préférer un dosage le matin
Noter volume des 24 heures